



## پرسیدین ۳٪



ضد عفونی کننده سرد ماشین های همودیالیز  
و سیستم های RO

بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید

### خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو
- ضد عفونی سرد ماشین های همودیالیز و سیستم های RO
- حاوی پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید جهت ایجاد اثر بخشی بیشتر و پایدار
- دارای تاییدیه طیف اثر ضد میکروبی علیه باکتری، قارچ، مخمر و ویروس منطبق بر EN13727، EN13624، EN14476 و EN1040
- فاقد آلدئید، فنل و هالوژن
- جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و حذف آن
- ضد عفونی و رسوب زدایی همزمان
- زیست تجزیه پذیر و دوستدار محیط زیست
- مؤثر در طیف وسیع pH و دما

### مشخصات محصول

Color/Form	Clear colorless solution
pH	0.8-1.2
Shelf Life	18 month
Density	1-1.1 g/ml

### ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

Peracetic acid	2.5-3.5 gr
Hydrogen peroxide	20-24 gr
Excipients	up to 100

## بسته بندی صادراتی محصول

حجم	تعداد در کارتن	تعداد در پالت
5 L	3 gallons per carton	48 cartons per pallet

### دستورالعمل مصرف

پس از قرار دادن ظرف پرسیدین در محل مخصوص ماشین همودیالیز برای محلول ضد عفونی کننده، اتصالات و لوله های مربوطه را بر اساس دستورالعمل کاربر ماشین به آن متصل نمایید (در برندهای مختلف ممکن است روش اتصال متفاوت باشد). تنظیمات ماشین برای ضد عفونی سرد با پراستیک اسید را انتخاب کنید.

به طور معمول در برندهای مختلف ماشین با غلظت ۳ تا ۵ درصد برای یک سیکل ۳۰ تا ۵۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سلسیوس تنظیم شده است. باقیمانده احتمالی محلول ضد عفونی در آب شستشو با کمک کاغذ حاوی پتاسیم یدید و چسب ناشاسته (روش یدومتری) قابل تشخیص است.



### طیف اثر ضد میکروبی

#### Meets European Standards

##### Bactericidal Activity

According to EN 1040 (contact time: 5 min)	Staphylococcus. aureus/ATCC6538 Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027
According to EN 13727 (contact time: 15 min)	Staphylococcus. aureus/ATCC6538 Enterococcus. hirae/ATCC10541 Pseudomonas. aeruginosa/ATCC15442

##### Fungicidal Activity

According to EN 13624 (contact time: 15 min)	Aspergillus. niger/ATCC16404 Candida. albicans/ATCC10231
--	---

##### virucidal Activity

According to EN (14476&1053&TGA Australia) (contact time: 15 min)	this product is virucidal
---	---------------------------

\* طیف اثر ضد میکروبی به طور مرتب توسط بخش علمی شرکت پایش و به روز رسانی می شود لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تایید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، رویروی دانشکده دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵  
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹، ۵-۴۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)  
www.beban.com

Latest revision: May 1, 2022

## PERCIDINE 3%



### نکات فنی و ایمنی

- در محیط خنک و با تهویه کافی نگهداری و انبارش شود.
- از آشامیدن، استنشاق و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- برای رقیق سازی از دستکش و ماسک استفاده شود.
- از تماس محصول با پوست و چشم خودداری شود. در صورت تماس، محل را با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- از قرار گرفتن در مجاورت مواد سلولزی، مواد قابل اشتعال و شعله اجتناب شود.
- از پرتاب کردن و واژگون کردن محصول حین حمل و نقل اجتناب شود.
- محصول در ظرف دربسته نگهداری شود و بعد از هر بار مصرف، درب ظرف بایستی کاملاً بسته شود.
- محصول در ظرف اصلی خود نگهداری شود و از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نشود.

