

ASEPTINE®



اسپورسیدین



محلول فعال گلو تار آلدهید ۲/۴ درصد

خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو
- دارای تاییدیه از شرکت المپوس
- آماده برای استفاده بدون نیاز به فعال سازی
- قابلیت استفاده مجدد برای مدت ۲۸ روز (ارزیابی با تست سریع)
- موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها شامل باکتری، اسپورباکتری، مخمر، قارچ و مایکوباکتریوم منطبق بر EN13624 ، EN13727 ، EN14347 و EN14348
- اثر ضد عفونی کنندگی علیه باکتریها و مایکوباکتریوم در ۱۰ دقیقه
- اثر اسپورکشی در ۶۰ دقیقه EN14347
- ضد عفونی سطح بالا در ۲۰ دقیقه (بدلیل داشتن گلو تار آلدهید ۲/۴٪)
- بر طبق گایدلاینهای بالینی.
- فاقد اثرات خوردگی بر روی اجزاء سازنده آندوسکوپها

مشخصات محصول

Color/Form	Clear green solution
pH	5.7 - 6.3
Shelf Life	2 years
Density	0.98-1 g/ml

ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

Glutaraldehyde	2.4 gr
Excipients	up to 100

بسته بندی صادراتی محصول

حجم	تعداد در کارتن	تعداد در پالت
1 L	12 bottles per carton	44 cartons per pallet
5 L	3 gallons per carton	48 cartons per pallet

دستورالعمل مصرف

روش دستی:

- ابتدا اجزای دستگاه را از هم جدا کرده و با یک شوینده مناسب (مانند هایساید EZ_30 یا هایساید EZ_32) شستشو داده شود.
- سپس برای ضد عفونی سطح بالا برای مدت ۱۰ تا ۴۵ دقیقه (بر اساس توصیه سازنده دستگاه برای محلول‌های ضد عفونی سطح بالا حاوی مقادیر بزرگتر یا مساوی با ۲/۴ درصد گلو تار آلدهید) در محلول اسپورسیدین غوطه‌ور شود. برای از بین بردن اسپورها، به مدت ۱ ساعت نیاز به غوطه‌وری می‌باشد. این محصول حداکثر برای مدت ۲۸ روز قابلیت استفاده مجدد را دارد.

روش اتوماتیک:

- مخزن دستگاه با اسپورسیدین (۱۰-۱۲) لیتر پر شود.
- دستگاه به طور اتوماتیک در هر سیکل محلول را از مخزن بداخل سینک بارگذاری تزریق کرده و پس از طی زمان تنظیم شده و غوطه‌وری کامل آندوسکوپ، محلول را تخلیه و به مخزن منتقل می‌کند.

طیف اثر ضد میکروبی

Meets European Standards

Bactericidal Activity

According to EN 13727 Staphylococcus. aureus/ATCC6538
(contact time: 10 min) Enterococcus. hirae/ATCC10541
Pseudomonas. aeruginosa/ATCC15442

Yeasticidal Activity

According to EN 13624 Candida.albicans/ATCC10231
(contact time: 10 min) Aspergillus. niger/ATCC16404

Sporicidal Activity

According to EN 14347 Bacillus. cereus/ATCC12826
(contact time: 60 min)

Mycobactericidal Activity

According to EN 14348 Mycobacterium. terrae/ATCC15755
(contact time: 10 min)

* طیف اثر ضد میکروبی به طور مرتب توسط بخش علمی شرکت پایش و به روز رسانی می‌شود لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تایید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده
دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹ ، ۵ - ۶۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)
به‌بان‌شیمی
شرکت دارویی —
www.behban.com

Latest revision: May 1, 2022

SPORCIDINE



نکات فنی و ایمنی

- از آشامیدن و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- از تماس با چشم اجتناب شود.
- از باز گذاشتن درب محصول خودداری شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
- دور از گرما، شعله، منابع جرقه و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- بهتر است به منظور جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی در حین کار با مواد شیمیایی، از دستکش و پوشش مناسب و ماسک استفاده شده و به تهویه مناسب هوای محیط توجه شود.

