



پرسیدین آریو



ضد عفونی کننده قوی لوازم حساس پزشکی و بیمارستانی
بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید

خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو
- محلول آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی
- حاوی پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید جهت ایجاد اثربخشی بیشتر و پایدار
- دارای تاییدیه ضد خوردگی در زمان های توصیه شده از مرکز پژوهش متالورژی رازی بر روی فولاد ضد زنگ (SS316)، رابر، لاستیک، پلاستیک و سیلیکون
- دارای تاییدیه طیف اثر ضد میکروبی بر روی باکتری، مخمر، قارچ و ویروس منطبق بر EN14476، EN14561، EN13624، EN13727، EN14562 و EN1040
- فاقد باقیمانده سمی در محیط و ایمن برای محیط زیست بدلیل تجزیه پذیری به آب، اکسیژن و اسید استیک
- توانایی پاک کردن خون و مواد بافتی

مشخصات محصول

Color/Form	Clear colorless solution
pH	2-3
Shelf Life	18 month
Density	0.99-1.05 g/ml

ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

Peracetic acid	0.2-0.4 gr
Hydrogen peroxide	4-6gr
Excipients	up to 100

بسته بندی صادراتی محصول

حجم	تعداد در کارتن	تعداد در پالت
1 L	12 bottles per carton	44 cartons per pallet
5 L	3 gallons per carton	48 cartons per pallet

دستورالعمل مصرف

- این محصول آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد.
- ابتدا بایستی با استفاده از مواد شوینده مناسب و آب بقایای خون، بافت، پروتئین و مواد شوینده را از روی ابزارآلات، شستشو دهید.
- سپس مخزن ضدعفونی را از پرسیدین آریو پر کرده و ابزار مورد نظر را در آن غوطه ور کنید.
- ابزارآلات را پس از گذشت مدت زمان ۱۰ دقیقه از مخزن ضدعفونی خارج کنید.
- پس از خارج کردن ابزارآلات از مخزن ضدعفونی، آنها را با آب استریل یا فیلتر شده شستشو دهید.

طیف اثر ضد میکروبی

Meets European Standards

Bactericidal Activity

According to EN 1040 (contact time: 5 min)	Staphylococcus. aureus/ATCC6538 Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027
According to EN 13727 (contact time: 10 min)	Staphylococcus. aureus/ATCC6538 Enterococcus. hirae/ATCC10541 Pseudomonas. aeruginosa/ATCC15442
According to EN 14561 (contact time: 10 min)	Staphylococcus. aureus/ATCC6538 Pseudomonas. aeruginosa/ATCC15442 Enterococcus. hirae/ATCC10541

Fungicidal Activity

According to EN 13624 (contact time: 10 min)	Aspergillus. niger/ATCC16404 Candida. albicans/ATCC10231
According to EN 14562 (contact time: 10 min)	Aspergillus. niger/ATCC16404 Candida. albicans/ATCC10231

virucidal Activity

According to EN 14476&1053&TGA Australia this product is virucidal
contact time: 10 min)

* طیف اثر ضد میکروبی به طور مرتب توسط بخش علمی شرکت پایش و به روز رسانی می شود لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تایید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده
دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹، ۵-۶۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)
www.behban.com

Latest revision: May 1, 2022

PERCIDINE RU



نکات فنی و ایمنی

- در محیط با تهویه کافی نگهداری شود.
- از آشامیدن، استنشاق و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- برای رقیق سازی از دستکش و ماسک استفاده شود.
- از تماس محصول با پوست و چشم خودداری شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- محصول را در ظرف دربسته نگهدارید و بعد از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید.
- همیشه محصول را در ظرف اصلی خود نگهداری کنید و آن را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نکنید.

