



هایساید ساکشن



محلول ضد عفونی کننده غلیظ مخصوص ساکشن یونیت ها

هایساید ساکشن یک محلول غلیظ برای ضد عفونی ساکشن یونیت ها، کاسه اسپیتون و جداکننده های آمالگام است. این محصول به واسطه فرمولاسیون منحصر به فرد، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد. هایساید ساکشن توانایی پاک کردن باقی مانده های آلی مانند بزاق، خون، پروتئین ها و گرد و غبار دریل را از لوله های تخلیه دارد و به دلیل وجود ترکیبات بازدارنده خوردگی با اکثر مواد سازگار می باشد.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- محلول غلیظ و مقرون به صرفه
- فاقد آکدھید، فنول و کلر



مشخصات محصول

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| رنگ / شکل | محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ |
| pH | ۱۰-۱۳ |
| بو | بوی مشخصه |
| طول عمر قفسه ای | ۲۴ ماه |
| حلالیت (در آب) | کاملا محلول |



Special for
Infection Control
in Dental Settings

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید ساکشن)
• ۱۰ گرم بنز الکانیوم کلراید

مواد جانبی

- سورفکتانت
- بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- آب دیونیزه

بسته بندی

| | |
|--------------------|--------------------|
| حجم ۱۰ لیتری | ۲ عدد در هر کارتن |
| حجم ۵ لیتری | ۳ عدد در هر کارتن |
| حجم ۲/۵ لیتری | ۶ عدد در هر کارتن |
| حجم ۱ لیتری | ۶ عدد در هر کارتن |
| حجم ۵۰۰ میلی لیتری | ۲۰ عدد در هر کارتن |
| حجم ۲۵۰ میلی لیتری | ۳۰ عدد در هر کارتن |

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

| | |
|---|---|
| According to EN 13727 (contact time: 10 minutes use dilution: 2%) | Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 |
| According to EN 14561 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%) | Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 |

اثر بخشی علیه مخمر

| | |
|---|-------------------------------|
| According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%) | Candida. albicans/ ATCC 10231 |
| According to EN 14562 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%) | Candida. albicans/ ATCC 10231 |


اثر بخشی علیه قارچ

| | |
|---|--------------------------------|
| According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%) | Aspergillus. niger/ ATCC 16404 |
| According to EN 14652 (contact time: 60 minutes use dilution: 1%) | Aspergillus. niger/ ATCC 16404 |

اثر بخشی علیه ویروس

| | |
|---|---|
| According to EN 14476 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%) | Adenovirus type 5 Herpes simplex virus (HSV-1) |
|---|---|

Hazard Rating

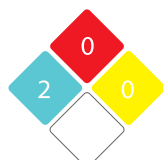

| Concentrate | NFPA |
|--------------|------|
| Health | 2 |
| Flammability | 0 |
| Reactivity | 0 |



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

روش مصرف

بعد از هر جراحی و قبل از ضدعفونی، ساکشن را کاملاً آبکشی نمایید. هایساید ساکشن باید قبل از استفاده با آب تا ۲٪ رقیق شود. ۲ لیتر از محلول رقیق شده تهیه کنید. از ۱/۵ لیتر از محلول رقیق شده برای ساکشن در هر یونیت استفاده کنید و ۵۰۰ میلی لیتر باقیمانده را در کاسه اسپیتون بریزید. پس از ۱۵ دقیقه آبکشی نمایید.

سازگاری

هایساید ساکشن با انواع متداول ساکشن یونیت، جداکننده های آمالگام و کاسه اسپیتون سازگار است. اما با آلومینیوم، مس، استیل گالوانیزه و پلی اورتان سازگار نمی باشد.