



هایساید ساکشن پلاس

محلول ضد عفونی کننده غلیظ مخصوص ساکشن یونیت ها

هایساید ساکشن پلاس یک محلول غلیظ برای ضد عفونی ساکشن یونیت ها، کاسه اسپیتون و جداکننده های آمالگام است. این محصول به واسطه فرمولاسیون منحصر به فرد، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد. هایساید ساکشن پلاس توانایی پاک کردن باقی مانده های آلی مانند بزاق، خون، پروتئین ها و گرد و غبار دریل را از لوله های تخلیه دارد و به دلیل وجود ترکیبات بازدارنده خوردگی با اکثر مواد سازگار می باشد.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- محلول غلیظ و مقرون به صرفه
- فاقد آکدھید، فنول و کلر



مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۹-۱۲/۵
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
حلالیت (در آب)	کاملا محلول



Special for
Infection Control
in Dental Settings

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید ساکشن پلاس)

- ۲/۴۷۵ گرم ان-۳-آمینوپروپیل-ان-دودسیل پروپان-۱-۳۰-دی آمین
- ۷/۵ گرم بنزالکونیوم کلراید


مواد جانبی

- سورفکتانت
- بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- آب دیونیزه

بسته بندی

حجم ۱۰ لیتری	۲ عدد در هر کارتن
حجم ۵ لیتری	۳ عدد در هر کارتن
حجم ۱ لیتری	۶ عدد در هر کارتن
حجم ۵۰۰ میلی لیتری	۲۰ عدد در هر کارتن
حجم ۲۵۰ میلی لیتری	۳۰ عدد در هر کارتن

Hazard Rating

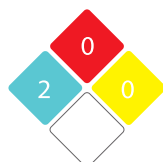

Concentrate	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 10 minutes use dilution: 2%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14652 (contact time: 60 minutes use dilution: 1%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Herpes simplex virus (HSV-1) Adenovirus type 5
---	---

روش مصرف

بعد از هر جراحی و قبل از ضدعفونی، ساکشن را کاملاً آبکشی نمایید. هایساید ساکشن پلاس باید قبل از استفاده با آب تا ۲٪ رقیق شود. ۲ لیتر از محلول رقیق شده تهیه کنید. از ۱/۵ لیتر از محلول رقیق شده برای ساکشن در هر یونیت استفاده کنید و ۵۰۰ میلی لیتر باقیمانده را در کاسه اسپیتون بریزید. پس از ۱۵ دقیقه آبکشی نمایید.

سازگاری

هایساید ساکشن پلاس با انواع متداول ساکشن یونیت، جداکننده های آمالگام و کاسه اسپیتون سازگار است. اما با آلومینیوم، مس، استیل گالوانیزه و پلی اورتان سازگار نمی باشد.